

Zásady správného usazení masky na obličej

- Před nasazením masky zkontrolujte, že je správně vyčištěna a dezinfikována (UV záření, dezinfekce na bázi lihu...).
- Zkontrolujte správnou pozici těsnění v oblasti nosu.
- Zkontrolujte, že závit lící části masky je pevně dotažen. Po nasazení masky zkontrolujte vzduchotěsnost tak, že ucpete otvor filtru a ověříte, že při nadechnutí nedochází k pod sávání. V případě potřeby přitáhněte masku k obličejí utažením gumiček ve spodní části masky. Masky jsou konstruovány tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu uživatelů, ale nevyhovuje 100%. V případě že maska nesedí na obličejí nebo netěsní, nedoporučujeme masku používat.
- Požadavek na těsnost není splněn, pokud se v těsnicí oblasti nacházejí vousy nebo vlasy.
- Masky lze používat opakovaně, je jí však nutno vždy dezinfikovat či sterilizovat a je nutné zabránit kontaminaci filtru z vnitřní strany masky. Po sterilizaci masky je nutné nechat ji úplně vychladnout.
- Detailní informace o správném používání filtru jsou v samostatné příloze dodané výrobcem filtru
- V případě mechanického poškození masky masku již nelze použít.
- Masky je nutné nasadit tak aby těsnění bylo ohnuté dovnitř masky a ne ven (viz. Obr.). V případě špatného nasazení nemusí maska splňovat těsnost.



Správně



Špatně